

Toelichting toepassing Qwiek.up



De Qwiek.up is een product die cliënten op verschillende niveaus prikkels kan geven door middel van een audio visuele beleving in hun eigen omgeving. Door middel van belevingsmodules haalt het een diversiteit van verschillende (herkenbare) belevingen het zorghuis in en is de Qwiek.up door zijn mobiliteit inzetbaar door het hele zorghuis. Het product is erop gericht om cliënten enerzijds mentaal te activeren, maar anderzijds ook juist te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt.

Onrust

Personeel, vrijwilligers of familie kunnen de Qwiek.up inzetten op de momenten die hierom vragen. Zo kan een cliënt onrustig zijn tijdens de verzorging op bed, en hierdoor verkrampen. De Qwiek.up kan op dat moment ingezet worden om deze ervaring voor de cliënt positief te veranderen en het werk voor het personeel ook efficiënter en plezieriger te maken. De Qwiek.up wil de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren en het personeel ontzorgen op momenten dat dit mogelijk is.

Belevingsgerichte zorg op wielen

De Qwiek.up is multifunctioneel inzetbaar bij een belevingsgerichte zorgaanpak. Allereerst kan het van iedere (slaap)kamer een snoezelkamer maken waardoor geen transfers meer nodig zijn richting een snoezelkamer. Vaak is dit ook niet mogelijk met bijvoorbeeld mensen die bedlegerig zijn. Deze mensen kunnen middels een verrijdbare Qwiek.up op hun eigen kamer cognitief geprikkeld worden op hun eigen niveau.

Communicatiemiddel

Daarnaast kan familie de Qwiek.up makkelijk gebruiken als communicatiemiddel door middel van foto's die op een usb stick worden gezet. Deze foto's



Qwiek BV

Smedestraat 2
6411 CR Heerlen
The Netherlands

T +31453690510
E info@qwiek.eu
W www.qwiek.eu

IBAN NL86RABO0146972228
BIC RABONL2U
KVK 57452563
BTW NL852586103B01

kunnen door familie geselecteerd worden thuis en op een usb stick in een slideshow worden afgespeeld. Op deze manier bied je familie handvaten om een gezamenlijk onderwerp te bekijken of te bespreken en ook een stuk reminiscentie te kunnen bieden.



Efficiëntie voor de zorgprofessional

Zorgprofessionals die 's ochtends en 's avonds de verzorging/verpleging op bed doen maken ook vaker gebruik van de Qwiek.up. Cliënten die normaliter verkrampen of agressief worden tijdens de verzorging op bed ervaren dit moment als zeer naar. Daarnaast is het voor de zorgprofessional ook geen plezierig moment. Door de inzet van de Qwiek.up tijdens dit zorgproces wordt de cliënt echter ontspannen en wordt de ervaring een positieve ervaring voor zowel de cliënt als de zorgprofessional.

Individueel en groepsgebruik

Naast het individueel gebruik wordt de Qwiek.up gebruikt in groepen op momenten dat er behoefte is aan gedragsverandering. Op momenten dat men weet dat de cliënten doorgaans onrustig worden (bijvoorbeeld vlak voor etenstijd rond 16:00) wordt de Qwiek.up 15 minuten van te voren aangezet om de sfeer te veranderen door middel van dynamische prikkels. Het ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld roepgedrag wordt op deze manier verholpen. Daarnaast wordt het in gangen ingezet om dynamische prikkels te geven aan de cognitie of zelfs om interactie te ontlokken. Zo wordt het centraal op gangen geplaatst, maar ook in kleine zithoekjes of nisjes.

Onderzoek

De Qwiek.up staat op vele locaties verdeeld waarvan het merendeel in Nederland geplaatst is. Enkele stuks staan in België en Duitsland. Momenteel loopt er een onderzoek bij Lunet Zorg waar verschillende 0 metingen gedaan zijn met de Qwiek.up en vervolgens nieuwe metingen met betrekking tot gedragsveranderingen bij gebruik van de Qwiek.up. De eerste resultaten indiceren dat in 86% van de gevallen de Qwiek.up het onbegrepen gedrag vermindert en het gewenst gedrag verhoogt.



Qwiek BV

Smedestraat 2
6411 CR Heerlen
The Netherlands

T +31453690510
E info@qwiek.eu
W www.qwiek.eu

IBAN NL86RABO0146972228
BIC RABONL2U
KVK 57452563
BTW NL852586103B01